

Conseil d'utilisation

Avant toute utilisation, placer les packs de froid au congélateur au minimum 2h. Il est conseillé de réaliser des séances de cryothérapie de 20 à 30 minutes toutes les 2 heures, en évitant tout contact direct avec la peau.

Pour toutes questions liées à l'utilisation du produit consulter votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste...), et contacter la société BODY ICING au : 0801 790 000 ou par mail : contact@bodyicing.com

Indications

Chirurgies Plastique, Esthétique et Reconstructrice : plastie abdominale, dermolipectomie.

Gynécologie Médicale et Chirurgicale : douleurs de la femme sauf la femme enceinte.

Chirurgie Viscérale et Bariatrique (de l'obésité) : cœlioscopie (ou laparoscopie), éventration, hernie inguinale, hernie ombilicale, pose d'anneau, bypass.

Chirurgie du Rachis : ALIF (arthrodèse par voie antérieure), OLIF (arthrodèse par voie latérale), TFIL (arthrodèse lombaire postérieure mini-invasive), PLIF (posterior lumbar interbody fusion) pour une fusion lombaire postérieure, trauma du rachis, laminectomie, discectomie, spondylolisthésis, cimentoplastie, chirurgie de hernie discale lombaire (sciatique, cruralgie).

Chirurgie Thoracique : fracture thoracique, fracture des côtes ou fissures des côtes enveloppent le thorax, trauma du rachis, si douleurs pour les pleuroscopies, thoracoscopies, médiastinoscopies.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.



Crunch Belt Ceinture abdominale de cryothérapie



BODY ICING
27 rue Jacques Lemerrier
Versailles 78000
contact : contact@bodyicing.com



Leaflet Crunch Belt 2023/08/V5


Fabriqué en France





La ceinture abdominale de cryothérapie CRUNCH BELT a été spécialement conçue et développée pour soulager et apaiser la douleur en post opératoire de Chirurgies Plastiques, Esthétiques et Reconstructrices, Viscérales, Bariatriques, Thoraciques, Gynécologiques, du Rachis ainsi que pour les douleurs d'ordre Gynéco-Médicales.



Ceinture abdominale de cryothérapie Crunch Belt

Réf.: Réf. EST60-BELT
EAN : 3665012001987
LPPR : 201E00.032

Prix : 71,90€ TTC
68,15€ HT

Veiller à respecter les indications d'usage (voir notice d'utilisation sur www.bodyicing.com) et les préconisations de votre médecin prescripteur.

COMMENT COMMANDER

Vous pouvez commander sur notre **site internet** :



www.bodyicing.com



(paiement sécurisé 3D secure)

À réception de votre commande, vous aurez un délai de 14 jours pour la modifier ou l'annuler en nous renvoyant votre attelle dans son emballage d'origine, à vos frais, à condition que celle-ci n'ait été ni portée, ni endommagée.

Pour toutes autres questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

par téléphone au



par mail à contact@bodyicing.com

Retrouvez-nous sur :

