

# BREAST ICING

## Coffret de cryothérapie pour la chirurgie du sein

### AVANTAGES DE LA CRYOTHÉRAPIE

- Soulage immédiatement la douleur
- Limite les saignements et les hématomes
- Permet de gérer l'œdème postopératoire
- Facile à utiliser à la maison
- Nettoyage facile



La cryothérapie offre des avantages pour la récupération après chirurgie du sein. La société Body Icing a conçu et fabriqué Breast Icing, un dispositif facile à utiliser, qui permet d'appliquer du froid sur la zone chirurgicale, afin de réduire la douleur, le gonflement et le saignement.

Il soulage la gêne et aide à gérer la douleur, ce qui permet de réduire l'utilisation d'analgésiques.

**Breast Icing** génère une action ciblée, et peut être utilisé à domicile ou en déplacement, ce qui permet aux patientes de participer activement à leur processus de guérison. Grâce à ses caractéristiques ergonomiques, ce dispositif optimise le rétablissement, ce qui en fait un outil précieux pour les patientes ayant subi une opération du sein.



« Vaincre la douleur avec notre solution révolutionnaire ! »



**Breast Icing** est un dispositif de cryothérapie conçu pour favoriser la récupération post-opératoire après chirurgie du sein. Il s'agit d'un ensemble de 2 packs de froid spécialement développés pour épouser parfaitement la forme des seins et assurer une répartition optimale de l'action du froid.

Le froid appliqué sur la zone sensible soulage la douleur et aide à réduire le gonflement.

 Fabriqué en France



#### Conseil d'utilisation :

20 min. par séance toutes les 4 heures. Première séance en salle d'opération après le pansement.



Dispositif Médical



Conforme aux exigences de l'Union européenne

## FACILE À UTILISER À LA MAISON

**Breast Icing** est une avancée en matière de confort pour les patientes. Conçu dans un souci de simplicité d'utilisation, il permet aux patientes d'appliquer elles-mêmes l'effet du froid sans difficulté, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Les patientes s'approprient ainsi le contrôle de la gestion de la douleur dans leur processus de guérison. En favorisant l'autonomie, l'utilisation intuitive du Breast Icing permet d'améliorer le bien-être général de la patiente.



## INDICATIONS

Chirurgie du sein uni ou bilatérale, réduction, augmentation (prothèses et/ou graisse), reconstruction (à l'exception des lambeaux libres tels que Diep, Gracilis, Pap) et après ablation partielle (tumorectomie) ou totale (mastectomie), lambeaux pédiculés. Mastodynies sur mastose fibrokystique et/ou pré-menstruelle, engorgement mammaire, infections mammaires (en complément du traitement antibiotique et local habituel).

Chirurgie de la gynécomastie associée ou non à une liposuction périphérique.

## CONTRE-INDICATIONS


Reconstruction mammaire par lambeau libre (Diep, Gracilis, Pap), reconstructions microchirurgicales, cryoglobulinémie, allergie au froid, insensibilité au froid, artérite, diabète.

## INSTRUCTIONS




Les packs de froid doivent avoir été placés au congélateur pendant au moins 2 heures avant utilisation.

La sangle dorsale est placée à plat, avec les fixations Velcro vers le haut. La patiente s'allonge par-dessus.

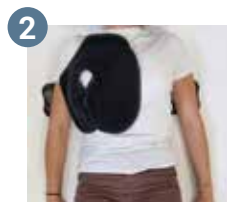

La patiente place les packs de froid sur ses seins.

Elle relie ensuite les 2 packs ensemble sur le devant.

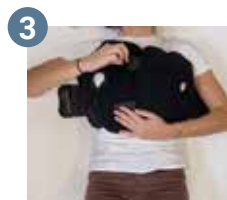

La patiente fixe les Velcros de la sangle dorsale sur chaque pack de froid. Il est possible d'ajuster le serrage en adaptant la fixation entre les 2 packs de froid.

La séance de cryothérapie de 20 min peut commencer.



Idéalement, le Breast Icing doit être utilisé en position allongée, au risque que les packs de froid ne restent pas en place.

### Prescrire :

**BREAST ICING** - Coffret de Cryothérapie pour la Chirurgie du Sein non substituable

Société BODY ICING (Réf: EST60-SEIN)



Pack de froid pour le sein gauche



Pack de froid pour le sein droit



Sangle dorsale Velcro



Rallonge



Valisette de transport