

CRUNCH BELT

Ceinture abdominale de cryothérapie

AVANTAGES DE LA CRYOTHÉRAPIE

- Soulage immédiatement la douleur
- Limite les saignements et les hématomes
- Permet de gérer l'oedème postopératoire
- Facile à utiliser à la maison
- Nettoyage facile



Conçue et fabriquée par « BODY ICING », la CRUNCH BELT met la cryothérapie à portée de tous.

La cryothérapie consiste à appliquer des températures froides sur la zone opérée, réduisant ainsi la douleur, les gonflements et les saignements. Elle soulage l'inconfort et aide à gérer la douleur, ce qui permet de réduire l'utilisation d'analgésiques.

La CRUNCH BELT génère un refroidissement ciblé et peut être utilisée de manière simple à la maison ou en déplacement, ce qui permet aux patients d'être acteurs de leur processus de récupération. Grâce à sa facilité d'utilisation, ce dispositif optimise le rétablissement, ce qui en fait un outil précieux pour les patients en phase postopératoire.



Utilisation recommandée :
20 min. par séance toutes les 2 à 4 heures



« Triomphez de la douleur avec notre solution révolutionnaire ! »



La Crunch Belt est un dispositif de cryothérapie conçu pour favoriser la récupération post-opératoire.

Sa rallonge lui permettent de s'adapter à la forme de l'abdomen, assurant ainsi un positionnement optimal du pack de froid.

Le froid ainsi appliqué sur la zone sensible soulage la douleur et aide à réduire le gonflement.

 **Fabriqué en France**



Dispositif Médical



Conforme aux exigences de l'Union européenne

FACILE À UTILISER À DOMICILE

La CRUNCH BELT constitue une avancée en matière de confort et d'autonomie pour le patient.

Conçue dans un souci de simplicité, elle permet aux patients de gérer eux-mêmes l'application de froid que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

En favorisant l'autonomie, la CRUNCH BELT contribue à rendre les patients actifs durant la phase de récupération, tout en améliorant leur bien-être général.



INDICATIONS

Gynécologie médicale : indication de la douleur chez les femmes sauf les femmes enceintes .

Chirurgie gynécologique : indication de douleur chez la femme sauf la femme enceinte

Chirurgie viscérale et bariatrique (obésité) : laparoscopie (ou laparotomie), éventration, cœlioscopie.

Chirurgie de la colonne vertébrale : ALIF (arthrodèse antérieure), OLIF (approche latérale), TFIL (arthrodèse lombaire postérieure mini-invasive), PLIF (arthrodèse lombaire postérieure).

Chirurgie thoracique : fracture du thorax, fracture des côtes ou fissures des côtes enveloppant le thorax, traumatisme de la colonne vertébrale, pleuroscopies, thoracoscopies, médiastinoscopies.

Chirurgie esthétique : abdominoplastie, dermolipectomie.

CONTRE-INDICATIONS

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies vasospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques provoquant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.

INSTRUCTIONS

Placer la ceinture avec les 2 baleines centrales à l'arrière (les 4 baleines peuvent être enlevées).

Placer la pack de froid dans le sens de la longueur, au bord de la ceinture (ou dans le dos pour une utilisation au niveau du rachis lombaire).

Couvrir l'abdomen avec le pack de froid puis fermer la ceinture à l'aide des velcros. Une rallonge peut être utilisée si nécessaire.

Au bout de 20 minutes, ouvrir la ceinture abdominale et retirer le pack de froid, puis le replacer dans le sac de congélation et remettre l'ensemble au congélateur.

1



2



3



CRUNCH BELT - Ceinture de cryothérapie

Réf. EST60-BELT



Ceinture abdominale



Pack de froid



Rallonge 45 cm



Sac de congélation