

## Cofanetto crioterapico per la Chirurgia della Mammella Breast Icing



### Composizione della confezione

Réf. EST60-SEIN



Impacco freddo per seno sinistro



Impacco freddo per seno destro



Fascia dorsale



Estensione

### ISTRUZIONI




1

Posizionare la fascia dorsale piatta su una superficie piana, con i velcro orientati verso l'alto (freccie rosse).



2

È disponibile un'estensione per la fascia dorsale, se del caso.

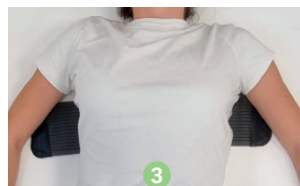

3

Sdraiarsi sopra la fascia in maniera tale che questa si trovi alla stessa altezza del seno.



4

Posizionare l'impacco freddo del seno destro (quello senza velcro), collocando l'areola al centro del foro.



5

Posizionare l'altro impacco freddo sul seno sinistro, poi fissare i 2 velcro sull'impacco che copre il seno destro.



6

Su entrambi i lati passare le dita nelle fessure della fascia dorsale, e fissarla su ciascun impacco freddo.



Il tutore del seno deve essere utilizzato in posizione sdraiata onde evitare lo spostamento degli impacchi freddi.

## Indicazioni

Chirurgia unilaterale o bilaterale della mammella, riduzione, aumento (protesi e/o grasso), ricostruzione (tranne che nei lembi liberi quali Diep, Gracilis, Pap) e a seguito di ablazione parziale (tumorectomia) o totale (mastectomia), lembi pedunculati. Mastodinie nella mastopatia fibrocistica e/o premenstruale, ingorgo mammario, infezioni mammarie (in aggiunta al consueto trattamento antibiotico e locale). Intervento di ginecomastia con o senza liposuzione periferica.

## Controindicazioni

Ricostruzione mammaria a lembo libero (Diep, Gracilis, Pap), ricostruzioni microchirurgiche, crioglobulinemia, allergia al freddo, insensibilità al freddo, arterite, diabete.

## Rischi legati all'utilizzo e precauzioni d'uso

Il presente dispositivo medico deve essere utilizzato come prescritto dal medico o in base alle istruzioni per l'uso rilasciate da personale sanitario debitamente autorizzato (farmacista, fisioterapista, ortottista, ecc.).

Il produttore non garantisce che l'uso di questo prodotto precluda la possibilità di lesioni. Prima dell'utilizzo, è assolutamente necessario verificare la completezza e l'integrità degli elementi del cofanetto. Non usare in caso di deterioramento. Alcuni fattori possono aumentare il rischio di ustioni cutanee (pazienti malnutriti, eccessivo tabagismo, diabetici insulino-dipendenti o persone con pelle sensibile). Si raccomanda una stretta sorveglianza medica.

Gli impacchi freddi non devono mai essere a contatto diretto con la cicatrice o con la pelle. Posizionarli sopra il reggiseno compressivo o utilizzare un panno protettivo.

Prima dell'utilizzo, gli impacchi freddi devono essere morbidi e non gelati.

Gli impacchi freddi non devono essere né intiepiditi, né scaldati.

In caso di fastidio o disagio rimuovere gli impacchi freddi.

Non forare gli impacchi freddi.

In caso di fuoriuscita del gel: maneggiare il dispositivo con i guanti, non ingerire il gel, non versare il gel in un sistema di drenaggio collegato alla rete fognaria o in un corso d'acqua.

Non gettare il dispositivo nell'ambiente, né con i rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto industriale speciale e conferito presso un centro di raccolta rifiuti.

In caso di contatto diretto della pelle con il gel sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua fredda. Contattare il medico in caso di irritazione persistente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e dalle persone non idonee all'uso del dispositivo.

## Pulizia

Gli impacchi freddi sono lavabili a mano con sapone neutro. Non intiepidire né scaldare gli impacchi freddi. Non lavare in lavatrice e non usare mai candeggina. Non immergere in un bagno detergente disinfettante.

Se necessario, spruzzare una soluzione detergente disinfettante (ANIOS detergente disinfettante per superfici alte).

Lasciare asciugare all'aria su una superficie piana. Per maggiori informazioni contattare la Body Icing o visitare il sito [www.bodyicing.com](http://www.bodyicing.com)

## ⚠ AVVERTENZE ⚠

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato che, conformemente a tali normative, reca il marchio CE. Prima dell'uso, leggere attentamente il presente foglio illustrativo e seguirne le istruzioni per l'uso.

In caso di dolore, gonfiore, sensazioni insolite, reazioni infiammatorie o allergiche, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo medico e consultare il prima possibile l'operatore sanitario autorizzato di riferimento (farmacista, fisioterapista, ortottista, ecc.), e contattare la Body Icing:

+33 801 790 000 o tramite il sito : [www.bodyicing.com](http://www.bodyicing.com)

In caso di reazioni gravi, contattare il distributore e l'autorità competente in Francia.



Dispositivo medico



Conforme ai requisiti dell'Unione Europea



Traçciabilità prodotto



Monopaziente multiuso



Codice lotto



Data di scadenza



-30°C 40°C  
Limiti di temperatura



Consultare le istruzioni per l'uso



Rispettare le istruzioni per l'uso



Privo di ftalati



Senza lattice



Non aprire con oggetti taglienti



Lavaggio a mano



Non stirare



Non candeggiare



No a tamburo



Pericoloso per l'ambiente