

Cintura addominale per crioterapia Crunch Belt



Composizione della confezione

Rif. EST60-BELT


Cintura di sostegno
addominale



Impacco freddo



Cavo di prolunga
da 45 cm



Cavo di prolunga
da 27 cm



Sacchetto per
congelatore

AVVISO / ISTRUZIONI


1

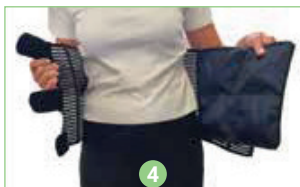
Posizionare l'impacco freddo nel sacchetto ermetico, quindi mettere il tutto in freezer (tra -18 e -22°C) per 8 ore prima dell'uso.


2

Se l'impacco freddo è duro o ghiacciato, attendere che si riscaldi. Non utilizzare mai direttamente sulla pelle.


3

Posizionare la cintura con le 2 balene centrali sul retro (le 4 balene possono essere rimosse), possono essere rimosse).


4

Posizionare l'impacco freddo nel senso della lunghezza, sul bordo della cintura (o nella parte posteriore per l'uso spinale).


5

Coprire l'addome con l'impacco freddo e chiudere la cintura con i velcri. Se necessario, è possibile utilizzare una prolunga.


6

Dopo 20 minuti, aprire la zona addominale della cintura e rimuovere l'impacco freddo, quindi rimetterlo nella borsa e riporlo nel congelatore.



Si consiglia di effettuare sessioni di crioterapia di 20-30 minuti ogni 2 ore, evitando il contatto diretto con la pelle. Per qualsiasi domanda relativa all'uso dei prodotti, consultare il medico, il chirurgo o un professionista sanitario autorizzato. (farmacista, fisioterapista, ortesista, ecc.) e contattare BODY ICING al numero: +33 801 790 000 o via e-mail: contact@bodyicing.com

Indicazioni per l'uso

Ginecologia medica: indicazione del dolore nelle donne ad eccezione delle donne in gravidanza.

Chirurgia ginecologica: indicazione di dolore nelle donne, eccetto le donne in gravidanza.

Chirurgia viscerale e bariatrica (obesità): laparoscopia (o laparoscopia), eventrazione, celioscopia.

Chirurgia della colonna vertebrale: ALIF (artrodesi anteriore), OLIF (approccio laterale), TFLIF (artrodesi lombare posteriore minimamente invasiva), PLIF (fusione intercorporea lombare posteriore), traumi della colonna vertebrale.

Chirurgia toracica: frattura del torace, frattura delle costole o incrinature delle costole che avvolgono il torace, trauma alla colonna vertebrale, pleuroscopie, toracoscopie, mediastinoscopie.

Chirurgia estetica: addominoplastica, dermolipectomia.

Controindicazioni

Allergia al freddo, insensibilità al freddo, sindrome di Raynaud o altre malattie vasospastiche, arterite, crioglobulinemia, malattia a cellule falciformi, arteriosclerosi, diabete, poliartrite, disturbi della sensibilità cutanea o ipercoagulazione, malattie vascolari periferiche che causano ischemia o debolezza della circolazione sanguigna locale.

Rischi di utilizzo e precauzioni d'uso

Questo dispositivo medico deve essere utilizzato secondo la prescrizione medica del medico o secondo le raccomandazioni d'uso del professionista sanitario debitamente autorizzato (farmacista, fisioterapista, ortesista, ecc.). Il produttore non garantisce che l'uso di questo prodotto non eviti lesioni. È indispensabile verificare la completezza e l'integrità degli elementi del kit prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.

Alcuni fattori possono aumentare il rischio di ustioni cutanee (pazienti malnutriti, fumatori eccessivi, diabetici insulino-dipendenti o persone con pelle fragile): si raccomanda una stretta sorveglianza medica.

L'impacco freddo non deve mai essere a contatto diretto con la cicatrice o la pelle. Utilizzare un tessuto protettivo. L'impacco freddo deve essere morbido e non ghiacciato prima dell'uso.

Non riscaldare o scaldare l'impacco freddo. In caso di imbarazzo o disagio, rimuovere l'impacco freddo. Non forare l'impacco freddo. In caso di perdita di gel: maneggiare il dispositivo con i guanti, non ingerire il gel, non versare il gel in un sistema di drenaggio collegato alle fognature o in un corso d'acqua.

Non gettare il dispositivo in natura o con i rifiuti domestici. Lo smaltimento avviene con i rifiuti industriali speciali, nel centro di riciclaggio.

In caso di contatto diretto del gel con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua fredda. Contattare il medico se l'irritazione persiste. Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone non idonee all'uso di questo dispositivo.

Manutenzione

L'impacco freddo può essere lavato a mano con sapone neutro. Non lavare in lavatrice e non usare mai la candegina. Non immergere in un bagno di detergente disinfettante. Se necessario, spruzzare una soluzione detergente disinfettante (detergente disinfettante ANIOS per superfici alte). Lasciare asciugare all'aria e stendere in piano.

Per ulteriori informazioni, contattare Body Icing o visitare il sito web www.bodyicing.com.

⚠ ATTENZIONE ⚠

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato che, in base a questa normativa, è contrassegnato dal marchio CE. Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e seguire le raccomandazioni d'uso. In caso di dolore, gonfiore, sensazioni insolite, reazioni infiammatorie o allergiche, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo medico e consultare il prima possibile un operatore sanitario autorizzato (farmacista, fisioterapista, ortesista, ecc.) e contattare Body Icing: +33 801 790 000 o www.bodyicing.com. In caso di reazione grave, contattare il distributore e le autorità competenti in Francia.



Dispositivo medico



Marchio CE



Tracciabilità del prodotto



Uso multiplo per un singolo paziente



Codice lotto



Data di scadenza



Limite di temperatura



Consultare le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE consultare la documentazione di accompagnamento



Nessuno ftalati



Nessun lattice



Non tagliare



Lavare a mano



Non stritare



Non candeggiare



Assciugatura a secco



Pericoloso per l'ambiente