

POLAR BELT®

Ceinture de cryothérapie pour chirurgie mammaire

AVANTAGES DE LA CRYOTHÉRAPIE

- Soulage immédiatement la douleur
- Limite les saignements et les hématomes
- Permet de gérer l'œdème postopératoire
- Facile à utiliser à la maison
- Nettoyage facile



La cryothérapie offre des avantages pour la récupération après chirurgie du sein. La société **BODY ICING®** a conçu et fabriqué **POLAR BELT®**, un dispositif facile à utiliser, qui permet d'appliquer du froid sur la zone chirurgicale, afin de réduire la douleur, le gonflement et le saignement.

Il soulage la gêne et aide à gérer la douleur, ce qui permet de réduire l'utilisation d'analgésiques.

POLAR BELT® génère une action ciblée, et peut être utilisé à domicile ou en déplacement, ce qui permet aux patientes de participer activement à leur processus de guérison. Grâce à ses caractéristiques ergonomiques, ce dispositif optimise le rétablissement, ce qui en fait un outil précieux pour les patientes ayant subi une opération du sein.



« Vaincre la douleur
avec notre solution
révolutionnaire ! »



POLAR BELT® est un dispositif de cryothérapie conçu pour favoriser la récupération post-opératoire après chirurgie du sein. Son pack de froid spécialement développé pour épouser parfaitement la forme des seins, assure une répartition optimale de l'action du froid.

Le froid appliqué sur la zone sensible soulage la douleur et aide à réduire le gonflement.



Conseil d'utilisation :

20 min. par séance toutes les 4 heures. Première séance en salle d'opération après le pansement.



Fabriqué en France



Dispositif
Médical



Conforme aux exigences
de l'Union européenne

FACILE À UTILISER À LA MAISON

La **POLAR BELT®** constitue une avancée en matière de confort et d'autonomie pour les patientes.

Conçu dans un souci de simplicité, il permet aux patientes de gérer elles-mêmes l'application de froid que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

En favorisant l'autonomie, la **POLAR BELT®** contribue à rendre les patientes actives durant la phase de récupération, tout en améliorant leur bien-être général.



INDICATIONS

Chirurgie mammaire uni ou bilatérale, de réduction, d'augmentation (prothèses et/ou graisse), de reconstruction (à l'exception des lambeaux libres de type Diep, Gracilis, Pap) et après ablation partielle (tumorectomie) ou totale (mastectomie), lambeaux pédiculés. Mastodynies sur mastose fibrokystique et ou en pré-menstruel, engorgements mammaires, infections du sein (en complément du traitement antibiotique et local habituel). Chirurgie de la gynecomastie associée ou non à une liposuction périphérique.

CONTRE-INDICATIONS

Reconstruction mammaire par lambeau libre (Diep, Gracilis, Pap), reconstructions microchirurgicales, cryoglobulinémie, allergie au froid, insensibilité au froid, artérite, diabète.

INSTRUCTIONS



1 Le pack de froid doit avoir été placé au congélateur pendant au moins deux heures avant utilisation.

S'allonger par-dessus, de manière à ce que la partie dorsale soit située au même niveau que la poitrine. Les parties incurvées doivent se situer sous les aisselles.



2 Placer le pack de froid sur la poitrine.

Le pack de froid ne doit jamais être en contact direct avec la peau.

Fixer la partie droite sur le pack de froid, puis la partie gauche. Ajuster si nécessaire.



3 Après 20 minutes de cryothérapie, replacer le pack de froid dans le sachet puis au congélateur pendant au moins 2 heures avant la prochaine utilisation.

Pour immobiliser le thorax ou l'abdomen, remplacer le pack de froid par le plastron abdomino-thoracique et répéter les opérations précédentes.

POLAR BELT®

Ceinture de cryothérapie pour chirurgie mammaire

Réf. EST60-BELT



Pack de froid



Plastron abdomino-thoracique



Partie dorsale



Partie latérale gauche élastique



Partie latérale droite élastique



Sac de congélation