

Endochill

Ceinture de soutien abdominale pour soin de cryothérapie abdomino-pelvien



Composition du colis :

Réf. EST-ENDOCHILL



Pack de froid

Sangle
d'entrejambeCeinture de soutien
abdominal

Rallonge de 45 cm

Sac de
congélation

INSTRUCTIONS



Placer le pack de froid dans le sachet hermétique, puis mettre l'ensemble au congélateur (entre -18 et -22°C) pendant au moins 4h avant utilisation.



Fixer le pack de froid, sur la face intérieure de la ceinture, entre les deux baleines ventrales. Si le pack de froid est dur ou comporte du givre, attendre qu'il se réchauffe. Ne jamais utiliser directement sur la peau.



Placer le pack de froid sur le bas ventre. La fermeture de la ceinture se fait en commençant par fermer le velcro du milieu. Utilisez la rallonge si nécessaire.



Fixer la sangle d'entrejambe à l'extrémité du pack de froid.



Fixer l'extrémité de la sangle d'entrejambe sur l'arrière de la ceinture.



Après 20 min, ouvrir la ceinture, retirer le pack de froid puis le replacer dans le sachet et le remettre dans le congélateur jusqu'à la prochaine utilisation.

Indications

En cas de déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique, par exemple : Chirurgie gynécologique, gynécologie médicale et obstétrique dont post-partum.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.). Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Il est impératif de vérifier l'intégralité et l'intégrité des éléments du dispositif avant son utilisation. Ne pas utiliser en cas de dégradation. Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, tabagisme excessif, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile) : une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ou la peau. Utiliser un tissu protecteur. Le pack de froid doit être souple et ne pas présenter de givre avant utilisation. Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. En cas de gêne ou d'inconfort, enlever le pack de froid. Ne pas percer le pack de froid. En cas de fuite du gel : manipuler le dispositif avec des gants, ne pas ingérer le gel, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau.

Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie.

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide. Contacter votre médecin en cas d'irritation persistante. Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant. Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Laisser sécher à plat à l'air libre. Pour plus d'informations, contacter la société Body Icing ou consulter le site www.bodyicing.com

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation. En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.) et contacter la société Body Icing : 0801 790 000 ou via le site www.bodyicing.com. Tout accident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant : Body Icing et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé : www.ansm.sante.fr



Dispositif
médical



Conforme
aux exigences
de l'UE



Traçabilité
produit



Un seul patient -
à usage multiple



Référence



Durée optimale
d'utilisation



Température
limite



Lire la notice
d'utilisation



Respecter
les consignes
d'utilisation



Sans phtalates



Sans latex



Ne pas ouvrir
avec un objet
coupant



Lavage
à la main



Ne pas
repasser



Ne pas
javelliser



Séchage
en machine
ou à sec interdit



Dangereux pour
l'environnement