

Ceinture de soutien abdomino-thoracique pour soin de cryothérapie - Polar Belt

Composition du colis :

Réf. EST-POLARBELT



Partie latérale gauche élastique




Partie dorsale



Partie latérale droite élastique



Plastron abdomino-thoracique

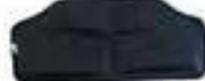

1 pack de froid



1 sac de congélation

INSTRUCTIONS



Placer le pack de froid dans le sachet hermétique, puis mettre l'ensemble au congélateur (entre -18 et -22°C pendant 8h avant la 1ère utilisation. Si le pack de froid est dur ou comporte du givre, attendre qu'il se réchauffe.



3 options de tailles sont disponibles. Fixer la partie dorsale sur la position correspondante à votre circonférence :

Position 1 : entre 80 et 120cm

Position 2 : entre 121 et 135cm

Position 3 : entre 136 et 150cm



S'allonger par-dessus, de manière à ce que la partie dorsale soit située au même niveau que la poitrine. Les parties incurvées doivent se situer sous les aisselles.



Placer le pack de froid sur la poitrine. Le pack de froid ne doit jamais être en contact direct avec la peau



Fixer la partie droite sur le pack de froid, puis la partie gauche. Ajuster si nécessaire



Après 20 minutes de cryothérapie, remplacer le pack de froid dans le sachet puis au congélateur pendant au moins 2 heures avant la prochaine utilisation.

Pour immobiliser le thorax ou l'abdomen, remplacer le pack de froid par le plastron abdomino-thoracique et répéter les opérations précédentes.



S'allonger par-dessus, de manière à ce que la partie dorsale soit située au même niveau que l'abdomen.



Placer le plastron abdomino-thoracique sur le ventre.



Fixer les 2 sangles sur le plastron. Ajuster si nécessaire.



Il est conseillé de réaliser des séances de cryothérapie de 20 à 30 minutes toutes les 2 heures, en évitant tout contact direct avec la peau. Pour toutes questions liées à l'utilisation du produit, consulter votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste...), et contacter la société BODY ICING au : 0801 790 000 ou par mail : contact@bodyicing.com

Indications

En cas de déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique, par exemple chirurgie gynécologique, gynécologie médicale et obstétrique dont post-partum

Chirurgie haute de l'abdomen.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale. Reconstruction mammaire par lambeau libre, reconstructions microchirurgicales.

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.). Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Il est impératif de vérifier l'intégralité et l'intégrité des éléments du coffret avant son utilisation. Ne pas utiliser en cas de dégradation. Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, tabagisme excessif, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile) : une surveillance médicale étroite est alors préconisée. Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ou la peau. Les placer par-dessus le soutien-gorge compressif, ou utiliser un tissu protecteur. Le pack de froid doit être souple et ne pas présenter de givre avant utilisation. Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. En cas de gêne ou d'inconfort, enlever les packs de froid. Ne pas percer le pack de froid. En cas de fuite du gel : manipuler le dispositif avec des gants, ne pas ingérer le gel, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau. Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie. En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide. Contacter votre médecin en cas d'irritation persistante. Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant. Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes). Laisser sécher à plat à l'air libre. Pour plus d'informations, contacter la société Body Icing ou consulter le site www.bodyicing.com

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation. En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.), et contacter la société Body Icing : 0801 790 000 ou via le site www.bodyicing.com. Tout accident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant : Body Icing et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé : www.ansm.sante.fr



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'UE



Traçabilité produit



Un seul patient – à usage multiple



Référence



Durée optimale d'utilisation



Température limite



Lire la notice d'utilisation



Respecter les consignes d'utilisation



Sans phthalates



Sans latex



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Lavage à la main



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Séchage en machine ou à sec interdit



Dangereux pour l'environnement